


Dr Brown's™

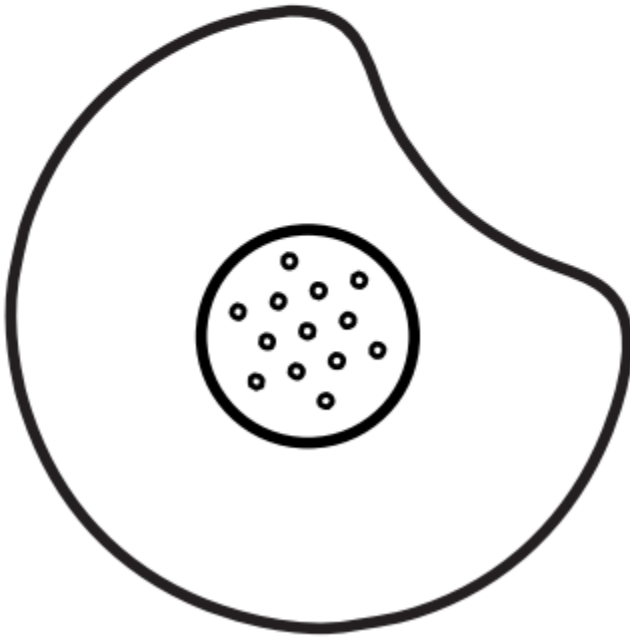

Tepelhoedjes

Maat 1 – tot 24 mm Maat 2 25 mm en groter

Gebruik tepelhoedjes altijd onder toezicht van deskundige begeleiding

Reiniging

Voor het eerste gebruik én na elk gebruik de tepelhoedjes wassen in een sopje met wat mild afwasmiddel, schoonspoelen, steriliseren en aan de lucht laten drogen.

Steriliseren



Plaats de tepelhoedjes op de houders in de steriliseercassette. Voeg 5 theelepels/25 ml water toe. Sluit de cassette en plaats deze gedurende 3 minuten in de magnetron op 700 – 1000 watt. Wees voorzichtig bij het uitnemen van de cassette uit de magnetron. Deze kan heet zijn.

Laat het water uit de cassette lopen door de openingen. Open het deksel en laat de tepelhoedjes ten minste 5 minuten drogen en afkoelen. Zorg ervoor dat de tepelhoedjes en cassette droog zijn, voordat u het deksel sluit om op te bergen.


Gebruiksaanwijzing

1. Zorg voor schone handen. Pak het tepelhoedje met beide handen vast. De glanzende kant komt op de huid, de matte kant aan de buitenkant.

2. Positioneer het tepelhoedje op de plaats waar de baby het neusje zal houden.

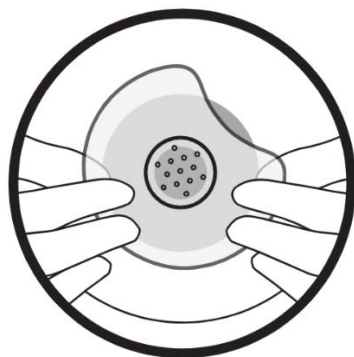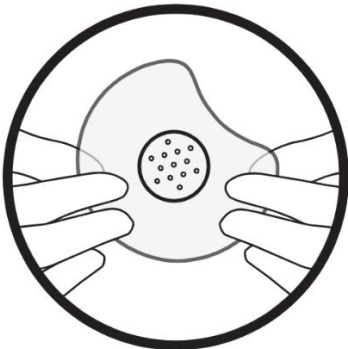

3. Plaats het tepelhoedje voorzichtig over de borst, zorg ervoor dat de tepel volledig is bedekt.

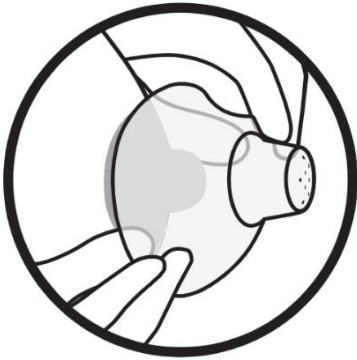

4. Voor een betere hechting kan een tepelcrème op de huid worden aangebracht. NIET op de tepel aanbrengen.



5. Strijk het tepelhoedje glad voor volledige hechting.

